

# Surtido preparación del medicamento

## Triturador de pastillas Tookan®

El triturador de pastillas Tookan® permite triturar los comprimidos hasta obtener un **polvo fino**. Está equipado con un asa que facilita la trituración de las pastillas sin esfuerzos y conviene así a todos.

Gracias a las bolsitas almacenables en el Tookan®, **ninguna pérdida ni contaminación** está posible con otros medicamentos. ¡Se cumple entonces totalmente la higiene!




Higiénico



Ergonómico

## Ventajas

- ▶ De uso simple
- ▶ Materiales resistentes a los productos de desinfección del ámbito hospitalario
- ▶ Trituración sin esfuerzo
- ▶ Almacenamiento de las bolsitas en el triturador

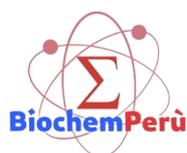

# Triturador de pastillas Tookan®

## Características técnicas

### Triturador de pastillas Tookan®

- ▶ Base de chapa de acero con tratamiento epoxy
- ▶ Asa de poliamida
- ▶ Pieza de aluminio anodizado para triturar
- ▶ Ejes de inox

### Bolsitas para triturador

- ▶ Polietileno transparente de baja densidad
- ▶ Espesor: 180/200 µm
- ▶ Respetuoso del medio ambiente



Descripción

Dimensiones (en mm)

Referencia

Triturador manual de pastillas Tookan®

L. 265 x An. 75 x Alt. 90

NA00017

Lote de 1000 bolsitas para Tookan®

L. 50 x Alt. 100

NA00011.01

## Proceso de uso



1 Tomar una bolsita en el compartimiento del triturador.



2 Poner las medicinas en la bolsita y replegarlo.



3 Poner las pastillas en la bolsita de polietileno e introducir la bolsita en el triturador.



4 Apoyar ligeramente en el asa con la punta de los dedos sin relajar la bolsita.



5 Ahora, Ud puede tomar las pastillas convertidas en polvo.

